

Nabídka přístrojů a zařízení

Křeslo gynekologické Golem 6P-G0601

Výrobce: RQL s.r.o.

Výrobní č. 003 779/G

Rok výroby: 2011

Evidenční č. 3182

Inventární č. 400000785

Pořiz.cena 44.899 Kč



V případě dotazů kontaktujte pí Zdeňku Křížánkovou, tel.284 016 485

Jaromír Šiřina



Marcela Šiřinová

RQL s.r.o. U Jelena 7/109 736 01 Havířov - Šumbark

www . RQL . cz

OR KOS v Ostravě oddíl C vložka
22696

e-mail : RQL@RQL.cz

IČO 25860020

IČZ 87 442 000

DIČ CZ25860020

tel. + fax : 596 884 575, 596 884 589

mobil: 603 822 964, 604 232 797

PROTOKOL

o preventivní bezpečnostní technické kontrole, provedené dle § 45 zákona 375/2022 Sb.
o zdravotnických prostředcích

Uživatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice, statní příspěvková organizace, Ústavní 91/7, 181 02
Praha-Bohnice

Umístění: Budova 6, gynekologická ambulance, přízemí

Odpovědný pracovník:

Typ zařízení: GOLEM 6P – gynekologický a urologický vyšetřovací stůl

Výrobní číslo: 003779/G

Závěr: Zařízení je funkční. Následující kontrola v 3/2025

Kontrolu provedl: Lukáš Jirout

Datum: 22.3.2023

potvrzení výrobce:



RQL s.r.o.
U Jelena 7/1
736 01 Havířov

IČO: 25 86 00 20 DIČ: CZ 25 86 00 2

Zápis o provedení PBTk podle § 45 Zákona 375/2022 Sb. u lehátek, stolů a křesel GOLEM (ZP třídy I):

Typ a typ výrobní číslo (inventární číslo) umístění (oddělení, číslo dveří, patro, budova) odpovědná osoba
GGP 00347916 9177 BUDOVA 6
PŘÍZEMÍ GYN. AMB

1. Proveďte zevrubné ohledání ZP na mechanické poškození. Případné poškození vyhodnoťte jako závažné, bránící dalšímu používání ZP, nebo nepodstatné, odpovídající běžnému opotřebení ZP.

2. Zkontrolujte neporušenost přívodního kabelu.

Po celé délce kabelu prověřte, zda-li je izolace celistvá, a kabel nevykazuje známky zlomu nebo nastřížení. Nepřípustný je i vznik vyboulení na kabelu, který svědčí o poškození vnitřních vodičů.

Poškozený přívodní kabel je nutno vyměnit za nový.

V případě, že ZP ještě nemá přívodní kabel třívodičový s uzemňovacím vodičem, je nutno jej vyměnit a domontovat zemnicí kabel, šroub a vodič propojit spodní a horní rámy ZP. V tom případě je nutno odstranit původní nálepkou s označením třídy ochrany el. přístroje II. Nalepit novou nálepkou s označením třídy ochrany el. přístroje I. Zkontrolujte nálepkou s výrobním číslem a označením ZP. Pokud chybí, je nutno toto vyznačit v zápise a nálepkou dodatečně doplnit.

3. Zkontrolujte funkčnost ovládacích prvků.

Prohlédněte všechny ovládací prvky, zda-li nepostrádají popisky funkce. Zkontrolujte mechanický chod ovládacích prvků. V případě poškození kabelu k ovladači je nutno tento ovladač vyměnit za nový.

4. Proveďte kontrolu elektrické bezpečnosti přístrojem PU 284 Delta.

Kontrolní měření odporu ochranného vodiče R_{PE}

Kontrolní měření izolačního odporu R_{ISO}

Kontrolní měření unikajícího proudu I_D

Přípustné hodnoty 0,01 - 0,2 Ω

Přípustné hodnoty 1 - 19 M Ω

Přípustné hodnoty 0,01 - 3,5 mA

Výsledky zapište a porovnejte s přípustnými hodnotami. Potvrďte, zda-li přístroj vyhověl. Pokud ne, je nutno najít a odstranit příčinu nevyhovujícího výsledku. Opakujte měření.

Pokud je ZP pevně připojen do elektrické sítě, případně má externí nabíječku vestavěných akumulátorů, nelze tuto kontrolu provést. Zapište tuto skutečnost. (ZP s vestavěnými akumulátory a vestavěnou nabíječkou se tato výjimka netýká, ty je nutno standardně zkontrolovat).

5. Proveďte ověření funkčních parametrů přístroje.

ZP důkladně prohlédněte na přítomnost prasklin plastových krytů, vyhodnoťte jejich závažnost.

ZP důkladně prohlédněte na přítomnost prasklin v čalounění, vyhodnoťte jejich závažnost.

Proveďte funkčnost mechanických částí ZP. Pohyblivé součásti se musejí volně pohybovat bez výrazného odporu.

Proveďte stav spojovacích čepů pracovních ploch, v případě nutnosti tyto vyměňte.

Proveďte funkčnost všech částí ZP, které jsou nastavovány elektropohonem. Zhodnoťte bez zatížení i se zatížením zvukový projev při práci elektropohonů.

Proveďte funkčnost nastavení pamětí pracovní plochy (pokud je na ZP).

Proveďte funkčnost upínacích páček a ručních matic, funkčnost příslušenství a doplňků, funkčnost plynových pružin.

Proveďte funkčnost pojezdových koleček a jejich brzd (pokud jimi je ZP osazen). Nefunkční brzdy na pojezdových kolech jsou důvodem, bránícím dalšímu používání ZP.

6. Zhodnoťte stav ZP a označte, je-li schopen dalšího bezpečného provozu:

ZP schopen bezpečného provozu

~~schopen s výhradami~~

~~neschopen bezpečného provozu~~

Datum

20. 3. 2023

25 86 00 20 DIČ: CZ 25 86 00 2

Kontrolu provedl:

potvrzení uživatele: